

AIRTECH

感染症対策用簡易折り畳み式ブース(陰圧型)

TIB-2618N-1

感染症患者の隔離用陰圧ブースです。

1. 特徴

- ・ブース内を陰圧に保ち、感染症患者からのウイルス等の拡散を防止します。
*陰圧区域-2.5Pa、換気回数 12 回/時以上の設定が可能です。
- ・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して外に放出されます。
- ・フレームの組立は工具不要で、広げるだけで設営可能です。
- ・フレームはコンパクトに収納可能です。キャリングバッグが付属します。
- ・安価に導入可能です。

2. 組立手順イメージ・外観



① フレームを広げます。全ての工程で工具は不要です。

② ビニールカーテンを被せ、脚を伸ばします。



④ ブースをベッド周囲に移動し、クリーンパーティションを設置して完成です。




③ 側面のビニールカーテンを取り付けます。



フレーム収納時

寸法図

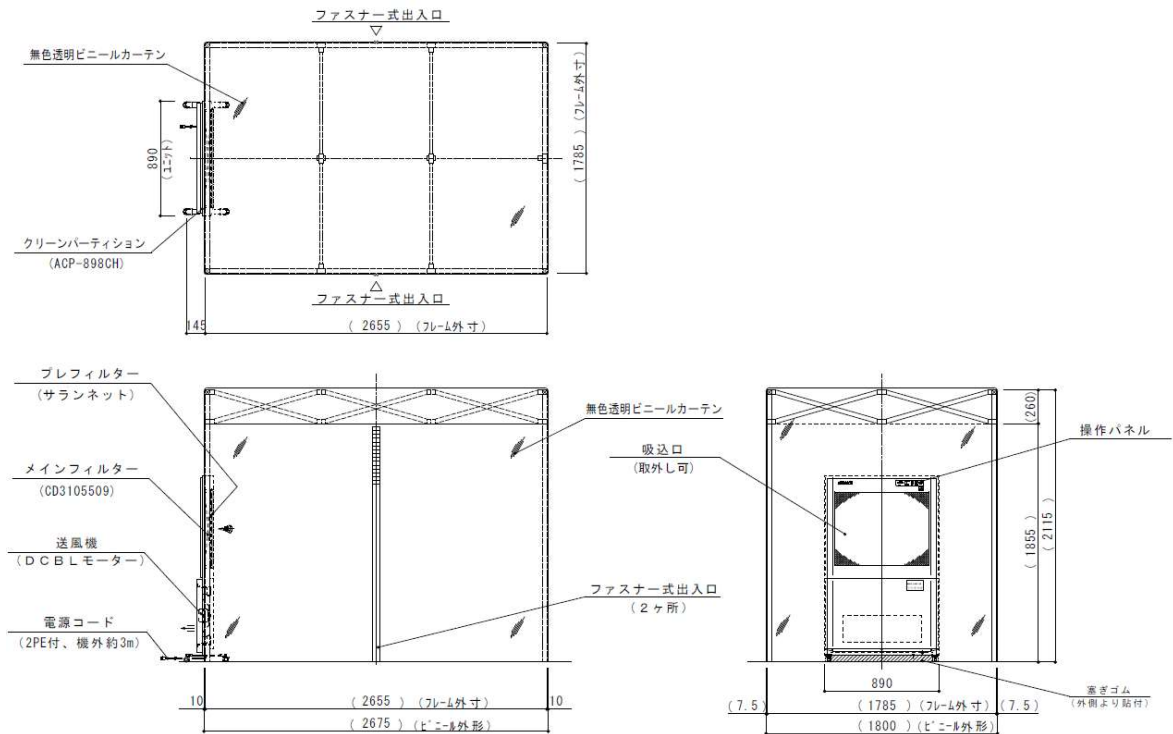

仕様

集塵効率	0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上 (上記は HEPA フィルターの集塵効率を示す。吹出部での総合効率は 99.5%以上)
集塵要素	プレフィルター ~ サランネットフィルター メインフィルター ~ HEPA フィルター
処理風量	強モード時 : 約 6.5m ³ /min、 静音モード時 : 約 3m ³ /min (大風量モード時 : 約 11.5 m ³ /min)
換気回数	強モード時 : 約 38 回/時、 静音モード時 : 約 18 回/時 (大風量モード時 : 約 68 回/時)
構造	ユニット ~ 鋼板製焼付塗装
	天井 ~ 無色透明ビニールカーテン
	ハリ・柱 ~ アルミ製抜型製アルマイト処理
	周囲 ~ 無色透明ビニールカーテン
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力	強モード時 : 約 30W(約 50VA)、 静音モード時 : 約 15W(約 22VA)
重量	約 55Kg

日本エアテック株式会社

本社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0032 宮城県仙台市若林区荒井 7-12-5	TEL 022-352-4504 FAX 022-352-4507
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸 3-6-29 クリエイト西公園 1F	TEL 092-401-1595 FAX 092-401-1594
静岡出張所	〒416-0922 静岡県富士市水戸島元町 5-14	TEL 0545-67-6262 FAX 0545-67-6363
熊本出張所	〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目 9-20	TEL 096-288-6388 FAX 096-288-6389
南九州出張所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。